



## Классическая расцветка оттенков VITA A1-D4

### Инструкция по применению

Уважаемые клиенты, благодарим Вас за решение приобрести Классическую расцветку оттенков VITA A1-D4 с окрашенными вручную зубами из керамики.

Классическая расцветка оттенков VITA A1-D4 предназначена для точного определения оттенка зуба.

#### Структура:

Оттенки Классической расцветки VITA A1-D4 разделены на следующие категории:

A1 . A2 . A3 . A3,5 . A4	B1 . B2 . B3 . B4	C1 . C2 . C3 . C4	D2 . D3 . D4
Красновато-коричневые	Красновато-желтоватые	Сероватые	Красновато-серые



#### Процедура подбора оттенков:

- Держите Классическую расцветку оттенков VITA A1-D4 на подходящем расстоянии (на расстоянии вытянутой руки) от рта пациента.
- Без колебаний выбирайте оттенок, сравнивая образцы групп A-D с естественными зубами.
- Дезинфицируйте расцветку оттенков после каждой процедуры подбора.

Если необходимо сделать подбор по насыщенности белого вместо подбора оттенка, мы рекомендуем расположить образцы оттенков в следующем порядке:

B1 . A1 . B2 . D2 . A2 . C1 . C2 . D4. A3 . D3 . B3 . A3,5 . B4 . C3 . A4 . C4

#### **Подсказки для подбора оттенков:**

- Если возможно, проводите процедуру подбора при дневном освещении или со стандартными лампами дневного света, а не в обычных условиях освещения помещения.
- Интерьер процедурного помещения предпочтительно должен быть выполнен в приглушенных тонах. Необходимо просить пациентов удалить следы губной помады или любой косметики, которая может повлиять на подбор оттенка. Одежду ярких цветов необходимо прикрыть серым халатом.
- Делайте выбор без промедления, всегда полагайтесь на первое решение, так как примерно после 5-7 секунд глаза начинают уставать.

#### **Советы по гигиене и инструкции по уходу:**

Акриловые части Вашей Классической расцветки оттенков VITA A1-D4 сделаны из высококачественного, легкого в уходе материала, устойчивого к высоким температурам (до 180 °С). Всю Классическую расцветку оттенков VITA A1-D4 можно автоклавировать при максимальной температуре в 140 °С.

#### **Дезинфекция:**

Можно проводить поверхностную дезинфекцию Классической расцветки оттенков VITA A1-D4. Мы рекомендуем классические мягкие дезинфицирующие средства в форме спреев или салфеток. В соответствии информацией от производителей данные средства эффективны против ВИЧ и вируса гепатита и имеются в наличии у большинства дилеров товаров для стоматологии. Пожалуйста, прочтите соответствующие инструкции по применению от производителя. Дезинфицирующие средства, содержащие фенол, соединения фенолфенола или метилэтилкетон, нанесут вред частям из акрила.

#### **Замечание:**

Акриловые части Классической расцветки оттенков VITA A1-D4 не являются мономерами и не имеют защиты от УФ-излучения, поэтому их нужно защищать от интенсивного солнечного света.

#### **Набор отбеленных оттенков VITA**

Набор отбеленных оттенков VITA позволяет Вам с точностью определить оттенок отбеленного зуба. Набор отбеленных оттенков VITA также доступен в качестве приложения к Классической расцветке оттенков VITA A1-D4 и Классической расцветке оттенков VITAPAN. Отбеленные оттенки OM1, OM2, OM3 являются компонентами Системы 3D-MASTER компании VITA.



ООО «Эс Джи Эйч»

119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 24, оф. 3

Тел.: 8 (499) 400-32-42

e-mail: [info\\_sgh@mail.ru](mailto:info_sgh@mail.ru)

<http://sgh-group.ru/>

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Postfach 1338 - D-79704 Bad Säckingen - Germany

Tel. +49 (0) 7761/562-0 - Fax +49 (0) 7761/562-299

Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 - Fax +49 (0) 7761/562-446

[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) - [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)